

ORTESIS MUÑECA RÍGIDA DE REPOSO CARP'IMMO®

INMOVILIZA Y ALIVIA LA MUÑECA



**CINTA
AUTOADHESIVA**
> ajuste de la ortosis
alrededor de la muñeca

**TEJIDO
FINO
Y SUAVE**
> confort
óptimo.



**REFUERZO
ANATÓMICO**
> inmoviliza la
muñeca en
posición neutral.

INDICACIONES:

Por la noche o en todas las situaciones en las que no use la mano, se recomienda llevar con regularidad la ortesis rígida CARP'IMMO® en caso de síndrome del túnel carpiano, de trastornos musculoesqueléticos, de inflamaciones o de tendinitis de la muñeca.

CONTRAINDICACIONES:

La ortesis no debe estar en contacto con una lesión cutánea.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

Este dispositivo médico es un producto sanitario regulado que lleva, en calidad de la reglamentación, el marcado CE. En caso de duda, pida consejo a su médico o a su farmacéutico o a cualquier otro profesional competente.

ESPECIFICIDADES:

Muy ligera, la ortesis EPITACT® se adapta a la muñeca para mantenerla cómodamente en posición neutra gracias a sus refuerzos anatómicos semirrígidos.

ERGONOMÍA:

Gracias a sus refuerzos desarrollados para adaptarse perfectamente a la morfología de la mano, la ortesis CARP'IMMO® le aporta una comodidad óptima. Ligera y ultrafina, no la notará cuando la lleve, ni siquiera cuando esté durmiendo. La ortesis se abre ampliamente para facilitar el paso de la mano. La cincha de apriete permite un ajuste homogéneo de la ortesis alrededor de la muñeca.

MANTENIMIENTO:

Lavado a mano a 30°C, con un jabón no agresivo sin detergente ni lejía. Enjuagar bien. Escurrir mediante presión. Para el secado, no exponer a una fuente de calor directo (radiador, rayos del sol). No usar quitamanchas.

COMPOSICIÓN: 59% téxtil (poliamida, elastano, poliuretano), 41% termoplástico elastómero.

Los materiales de la ortesis se han sometido a todas las pruebas reglamentarias impuestas por la norma ISO 10 993-1, relativa a los productos que entran en contacto con la piel. Si a pesar de ello sufre alguna molestia, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con MILLET Innovation.

MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2018.



lavable
a mano.



No planchar,
ni siquiera a vapor.



No lavar en
seco.



No usar
lejía.



No secar en
secadora.



LOT Ver embalaje.

Producto resultante de la investigación
de MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCIA

**MILLET
INNOVATION**

www.epitact.es